

La céramo-céramique sur zircone (cristalline) est **biocompatible** et **entièrement sans métal**.

La combinaison de l'**armature en zircone** réalisée par CFAO et de la **céramique stratifiée manuellement** confère à cette solution prothétique **précision, solidité et rendu esthétique élevé**.

QUEL PANIER DE SOINS ?

PANIER LIBRE

Prothèse exclusivement en panier libre

Code CCAM* : HBLD 403

Code matériau devis : 3

*pour l'intégralité des codes CCAM relatifs au produit, se référer à son éditeur de logiciel



ESTHÉTIQUE

- Limite cervicale esthétique sans liseré métallique.
- Recouvrement céramique stratifié pour un mimétisme parfait.
- Choix de la teinte de l'armature (masquer un inlay-core et les saturations de teintes de moignons).



MÉCANIQUE

- Grande résistance du zircone (> 1100 MPa).
- Pour couronne unitaire ou bridge de petite à grande portée.
- Facilité de réglage et de polissage.
- Céramique peu abrasive pour l'antagoniste.



BIOCOMPATIBILITÉ

- Excellente biocompatibilité.
- Tolérance du parodonte supérieure à celle de la CCM.
- Haute résistance à la corrosion.



MATÉRIAUX PROILAB

- **Céramique** : IPS e.max Ceram - Ivoclar Vivadent - CE0123 - Liechtenstein.
- **Zircone** : DDBioZX² - Dental Direkt - CE0482 - Allemagne.



CONSEILS

PRÉPARATION IDÉALE

- Espace optimal entre ~1,2 et 2 mm.
- La préparation de la limite cervicale peut être supra, juxta ou sous gingivale avec un épaulement périphérique ou un chanfrein avec angle interne arrondi.
- Éviter les angles vifs, les bords en biseau et les finitions de surfaces irrégulières.

LA PRISE D'EMPREINTE

- Optique, Silicones et élastomères (pas d'alginates).

SCÈLÈMENT

- Ciment et collage (vérifier compatibilité à vérifier auprès de vos fournisseurs).

L'AVIS D'ANTOINE, CÉRAMISTE



Pour moi, c'est la solution idéale pour convaincre votre patient avec un argument esthétique et sans métal. A privilégier sur les incisives, canines, 1^{ères} et 2^{ndes} prémolaires.

