

# Fiche technique

## Céramo-céramique

ZIRCON STRATIFIÉ



La céramo-céramique sur zircone (cristalline) est **biocompatible** et entièrement **sans métal**. La combinaison de l'**armature en zircone réalisée par CFAO** et de la **céramique stratifiée manuellement** confère à cette solution prothétique **précision, solidité et rendu esthétique élevé**.



### Esthétique

- Limite cervicale esthétique sans liseré métallique.
- Recouvrement céramique stratifié pour un mimétisme parfait.
- Choix de la teinte de l'armature (masquer un inlay-core et les saturations de teintes de moignons).



### Mécanique

- Grande résistance du zircone (> 1100 MPa).
- Pour couronne unitaire ou bridge de petite à grande portée.
- Facilité de réglage et de polissage.
- Céramique peu abrasive pour l'antagoniste.



### Conseils

#### PRÉPARATION IDÉALE

- Espace optimal entre ~1,2 et 2 mm.
- La préparation de la limite cervicale peut être supra, juxta ou sous gingivale avec un épaulement périphérique ou un chanfrein avec angle interne arrondi.
- Éviter les angles vifs, les bords en biseau et les finitions de surfaces irrégulières.

#### LA PRISE D'EMPREINTE

- Optique, Silicones et élastomères (pas d'alginates).

#### SCELLEMENT

- Ciment et collage (vérifier compatibilité à vérifier auprès de vos fournisseurs).



### Biocompatibilité

- Excellente biocompatibilité.
- Tolérance du parodonte supérieure à celle de la CCM.
- Haute résistance à la corrosion.



### Matériaux Protilab

- Céramique : IPS e.max Ceram - Ivoclar Vivadent - CE0123 - Liechtenstein.
- Zircone : DDBioZX<sup>2</sup> - Dental Direkt - CE0482 - Allemagne.

## L'avis de notre expert prothésiste



Pour moi, c'est la solution idéale pour convaincre votre patient avec un argument esthétique et sans métal. A privilégier sur les incisives, canines, 1<sup>ères</sup> et 2<sup>ndes</sup> prémolaires.

Antoine, Prothésiste conseil Protilab

## Quel panier de soins ?



### PANIER LIBRE

Prothèse exclusivement en panier libre

Code CCAM\* : HBLD 403

Code matériau devis : 3

\*pour l'intégralité des codes CCAM relatifs au produit, se référer à son éditeur de logiciel