

Fiche technique Céramo-métallique



Solution prothétique éprouvée depuis plusieurs décennies, **la CCM a aussi bénéficié de l'évolution du numérique** et des nouvelles techniques de production (CFAO, frittage laser).

La résistance et la précision de l'armature combinées à l'esthétique de la céramique stratifiée ont fait de cette solution prothétique la référence dans notre métier.



Esthétique

- Recouvrement en céramique stratifiée multi-couches pour un meilleur rendu.
- Épaulement vestibulaire céramique pour une finition de limite cervicale invisible (option).
- Masquage des différences de colorations des préparations et inlay-core pour un mimétisme parfait.



Mécanique

- Armature métallique très résistante, adaptée aux bridges longue portée.
- Réalisée par frittage laser pour un ajustage précis et passif.
- Facilité de réglage et de polissage.
- Céramique peu abrasive pour l'antagoniste.



Conseils

PRÉPARATION IDÉALE

- Espace optimal entre ~1,2 et 2 mm. Privilégier l'épaulement périphérique.
- La préparation de la limite cervicale peut être juxta ou sous gingivale. Pour un meilleur résultat esthétique, privilégier la limite sous gingivale.

LA PRISE D'EMPREINTE

- Optique, Silicones et élastomères (pas d'alginate).

SCELLEMENT

- Ciments classiques et hybrides (compatibilité à vérifier auprès de vos fournisseurs).



Infos +

- Choix de différents alliages possible (CoCr, Or).
- Idéale pour les travaux mixtes, l'armature réalisée par CFAO assure une précision des supports fraisés et la gestion des attachements afin d'accueillir au mieux les stellites.



Matériaux Protilab

- Céramique : Inline - Ivoclar Vivadent - CE0123 – Liechtenstein.

Armature :

- CoCr - Argeloy NP Suprem - Argen Corporation - CE0086 – USA.
- Or - Argen Corporation - CE0086 -USA.

L'avis de notre expert prothésiste



Solution de référence et polyvalente depuis mes débuts en prothèse, la CCM convient parfaitement pour les travaux combinés (attachements et fraisage), sur inlay-core métallique, en unitaire et en bridge. Solution idéale pour le secteur postérieur.

Gianni, Prothésiste conseil Protilab

Quel panier de soins ?



LES 3 PANIERS

Code CCAM*:

HBLD634 - Panier RAC 0 sur incisive, canine et 1^{ère} prémolaire

HBLD491 - Panier modéré sur 2^{ème} prémolaire

HBLD734 - Panier libre sur molaire

Code matériau devis : 4

*pour l'intégralité des codes CCAM relatifs au produit, se référer à son éditeur de logiciel