

Fiche technique

Facettes pelliculaires easyfit®



Les facettes pelliculaires easyfit® de Protilab sont **réalisées en e.max® pressé**, une vitrocéramique au disilicate de lithium idéale pour des **corrections esthétiques simples et rapides**. Très fines, elles évitent la taille systématique des dents naturelles et offrent une solution efficace et sûre. Faciles à poser, **2 à 3 séances suffisent**. Résistantes et durables, elles conservent leur luminosité et leur teinte naturelle au fil du temps.



Esthétique

- Recouvrement instantané des tâches et des colorations.
- Correction simple des dents ébréchées et mal alignées.
- Stabilité de la teinte.



Mécanique

- Extrême finesse (jusqu'à 0.3 mm), permettant une pose sans préparation ou préparation à minima.
- Grande résistance (470 MPa) à l'abrasion.



Conseils

PRÉPARATION IDÉALE

- En cas de diastème, retoucher les zones proximales pour faciliter l'insertion et la jonction des facettes.
- En cas d'imperfections de surface ou incisales, lisser les reliefs.
- Sur les dents mandibulaires, réduire le bord incisal d'environ 0,5 mm pour éviter la suroccclusion.

LA PRISE D'EMPREINTE

- Optique, silicones et élastomères (pas d'alginates).
- Pour un meilleur ajustement, privilégier les produits de rétraction gingivale lors de l'empreinte.

LA PRISE DE TEINTE

- Nous indiquer la teinte de la dent support et celle souhaitée.

SCELLEMENT

- Composite de collage de type Variolink® Esthetic.



Collage

- Idéal en association avec le composite de collage Variolink® Esthetic.
- 5 teintes disponibles.
- Élimination des excès facilitée.



Matériaux Protilab

- Céramique pressée : IPS e.max® Press - Ivoclar Vivadent - CE0123 – Liechtenstein



Découvrez notre tutoriel en ligne sur www.protilab.com rubrique «Nos ressources»

L'avis de notre expert prothésiste



Pour moi, c'est la solution par excellence combinant esthétisme et rapidité ! Je recommande la réalisation d'un wax-up ou mock-up pour valider la faisabilité du projet.
2 à 3 séances suffisent pour un résultat bluffant immédiat.

Gianni, Prothésiste conseil Protilab

Quel panier de soins ?



NON APPLICABLE

Code CCAM* : HBMD048
Code matériau devis : 3

* Pour l'intégralité des codes CCAM relatifs au produit, se référer à son éditeur de logiciel